

KIT TOMA DE MUESTRA DE MUCOSA BUCAL PARA INTOLERANCIAS ALIMENTARIAS

Finalidad prevista: Kit dirigido al paciente o profesional para la recogida de muestra de mucosa bucal, su conservación y transporte al laboratorio para pruebas de diagnóstico in vitro.

Contenido del kit:

- 1 Hoja de instrucciones
- 1 Volante de solicitud del laboratorio de destino
- 3 Torundas de algodón
- 2 Guantes de látex
- 1 Bolsa de plástico para los documentos
- 1 Caja de envío

Condiciones generales de uso y envío:

- La toma de muestra puede realizarse cualquier día.
- No realizar la toma de muestras después de haber comido.
- **Es importante que, durante el proceso, el resto de las personas presentes no hablen ni toquen la torunda.**

Precauciones de uso:

- No utilizar en el caso de que el paquete venga dañado o abierto.
- No reutilizar.
- Este kit no debe utilizarse para nada que no sea su uso previsto.

Instrucciones para la toma de muestra:

1. Anotar en los envases de las torundas: apellidos, nombre, fecha de nacimiento, y fecha de obtención de la muestra.
2. No realizar la toma de muestras después de haber comido. Colocarse los guantes.
3. Con cada una de las torundas frotar un mínimo de 20 veces por la cara interna de la mejilla realizando a la vez movimientos de rotación. **Es importante que, durante el proceso, el resto de las personas presentes no hablen ni toquen la torunda.**
4. Ir guardando cada una de las torundas en su envase correspondiente.
5. Guardar todas las torundas en el compartimiento correspondiente de la bolsa de plástico.
6. Complimentar el volante de solicitud e introducirlo en el bolsillo exterior de la bolsa de plástico.
7. Introducir la bolsa de plástico con las muestras y el volante de solicitud en la caja de transporte, llamar al transportista preferentemente el mismo día de la toma de la muestra.

Gestión del envío:

Para ello existen 3 opciones:

- Llamar a Nacex por teléfono: **964 254 032** e indicar que necesita realizar un envío a portes debidos al número de abonado 1201/75.
- Enviar un correo electrónico a: 1201.recogidas@nacex.es, con los siguientes datos imprescindibles: Fecha y hora de recogida (mínimo franja de 2 horas), Nombre y apellidos, Dirección completa, Empresa / Negocio (solo en el caso que no se recoja en el domicilio particular), Código Postal, Población, Provincia, Teléfono.
- Rellenar el cuestionario, accediendo a recogidascalderon.com

En caso de tener algún problema o duda a lo largo del proceso, llame al 964220216.

 Reglamento (UE) 2017/746 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2017, sobre los productos sanitarios para diagnóstico in vitro.	 Precauciones	 No usar si el paquete está dañado
 Número de identificación único	 Fecha de caducidad	 Fecha de fabricación
 Número de lote de fabricación	 Limitación de temperatura	 Fabricante
 Referir al manual de instrucciones	 Referencia producto	 Producto sanitario para diagnóstico in vitro
	 No estéril	 No reutilizable



AYALA SAMPLE KITS,S.L.
Paseo de la Universidad 48
ESC. 1 BAJA 13
Castellón de la Plana
12006 Spain

En caso de incidente grave relacionado con el producto el usuario debe comunicarse con el fabricante y la autoridad competente del Estado miembro en el que esté establecido. El contacto de la autoridad competente española es a través de la web notificaps.aemps.es

Versión 1
30/05/2024