

KIT TOMA DE MUESTRA DE ORINA **PARA METABOLITOS ORGÁNICOS EN ORINA**

Finalidad prevista: Kit dirigido al paciente o profesional para la recolección, conservación y transporte de muestras de orina para pruebas de diagnóstico in vitro.

Contenido del kit:

- 1 Hoja de instrucciones
- 1 Volante de solicitud de laboratorio de destino
- 1 Frasco para la orina
- 1 Bolsa refrigerante
- 1 Etiqueta
- 1 Bolsa para documentación y muestra
- 1 Bolsa isotérmica
- 1 Caja de transporte

Condiciones generales de uso y envío

Recoger la primera orina de la mañana.



La orina se tiene que enviar al laboratorio el mismo día de la obtención de la muestra.

Precauciones de uso:

Lea detenidamente las instrucciones antes de su uso.

No utilizar en el caso de que el paquete venga dañado o abierto.

No reutilizar.

Este kit no debe utilizarse para nada que no sea su uso previsto.

Instrucciones:

1. Guardar la bolsa refrigerante en el congelador.
2. Anotar en la etiqueta: apellidos y nombre, fecha de nacimiento, sexo y fecha y hora de obtención de la muestra.
3. Recoger la **primera orina de la mañana** (preferentemente en ayunas) en el frasco para la orina que se proporciona en el kit.
4. Cerrar el frasco herméticamente, introducirlo en la bolsa de plástico y mantenerlo refrigerado hasta el momento del envío.
6. En el momento del envío, colocar la bolsa de plástico con la muestra y la documentación junto con la bolsa refrigerante previamente congelada en la bolsa isotérmica. Colocar dentro de la caja de transporte y proceder al envío.

Gestión del envío

Para ello existen 3 opciones:

- Llamar a Nacex por teléfono: **964 254 032** e indicar que necesita realizar un envío a portes debidos al número de abonado 1201/75.
- Enviar un correo electrónico a: 1201.recogidas@nacex.es, con los siguientes datos imprescindibles: Fecha y hora de recogida (mínimo franja de 2 horas), Nombre y apellidos, Dirección completa, Empresa / Negocio (solo en el caso que no se recoja en el domicilio particular), Código Postal, Población, Provincia, Teléfono.
- Rellenar el cuestionario, accediendo a recogidascalderon.com

En caso de tener algún problema o duda a lo largo del proceso, llame al **964220216**.



AYALA SAMPLE KITS, S.L.
Paseo de la Universidad 48
ESC. 1 BAJA 13
Castellón de la Plana
12006 Spain

En caso de incidente grave relacionado con el producto el usuario debe comunicarse con el fabricante y la autoridad competente del Estado miembro en el que esté establecido. El contacto de la autoridad competente española es a través de la web notificaps.aemps.es

	Reglamento (UE) 2017/746 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2017, sobre los productos sanitarios para diagnóstico in vitro.		Precauciones		No usar si el paquete está dañado
	Número de identificación único		Fecha de caducidad		Fecha de fabricación
	Número de lote de fabricación		Limitación de temperatura		Fabricante
	Referir al manual de instrucciones		Referencia producto		Producto sanitario para diagnóstico in vitro
			No estéril		No reutilizable

Versión 2
29/7/2024